

CHLORAPREP®

ANTISÉPTICO CHG 2%-IPA 70%

APLICADOR DE 26mL

Fabricante **Carefusion by BD**
Código **CARDI354 260815 CHLORAPREP® aplicador 26mL c/tinte anaranjado**

USO PROPUESTO

ChloraPrep® es un producto destinado a ser usado como antiséptico cutáneo para la preparación de la piel del paciente previo a procedimientos quirúrgicos invasivos (cirugía menor y mayor) Su seguridad y eficacia ha sido demostrada ante la FDA.


DESCRIPCIÓN

El sistema comprobado de asepsia cutánea ChloraPrep® consiste en un dispensador/aplicador estéril que contiene la solución antiséptica (CHG 2% e IPA 70%) en un compartimento interno resguardada hasta su activación, previo uso. En un segundo compartimiento se ubica la esponja impregnada en el tinturante (anaranjado N°6) que es abierto solo al ser activado el producto, permitiendo la mezcla con la solución antiséptica.

Su original esponja de suave textura, presente en todos los aplicadores, controla el fluido de la solución y permite su penetración en las cinco primeras capas de la epidermis, donde se encuentra el 80% de la flora microbiana residente.

El aplicador se activa presionando, una única vez, de la pestaña frontal. Previo al uso, mantiene y protege la solución de la degradación, la contaminación y la disminución de sus propiedades por efectos externos.

El sistema de asepsia cutánea ChloraPrep® permite, por su diseño, mantener la técnica aséptica en todo momento ayudando a disminuir efectivamente la carga microbiana de la piel reduciendo los riesgos de infección del lugar a tratar.

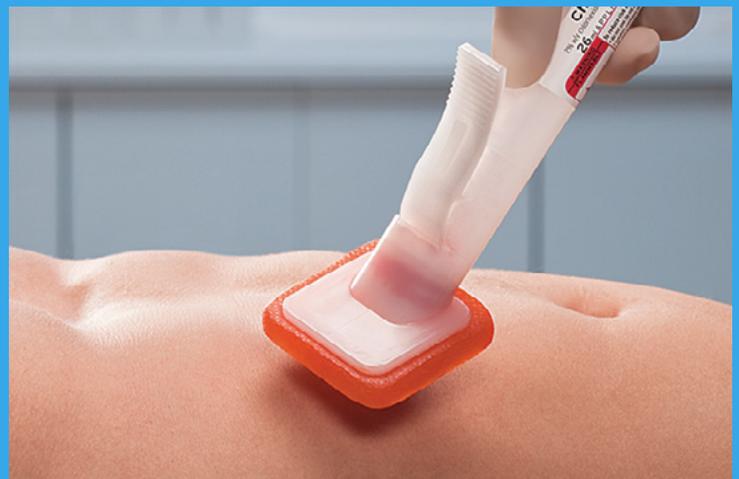

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

CHLORAPREP APLICADOR 26mL C/ TINTE ANARANJADO

Área cobertura aproximada

33,5cm x 33,5cm (1.122cm²)

Usos

Cirugía mayor abierta y cerrada.
Cirugía general. Cirugía laparoscópica.
Cirugía bariátrica. Cirugía torácica
y cardiovascular. Cirugía plástica
mama, lipectomía. Cirugía ortopédica
artroscópica, prótesis de cadera y de
rodilla. Cirugía de oncología

Tiempo de aplicación área de
incisión

30seg. en zonas secas y luego en la
periferia/2min. en zonas húmedas y luego
en la periferia

Tiempo de Secado

3min. piel sin vello/1h en cabello

Remoción Tinte

CHG-IPA/jabón y agua/alcohol/salina

Almacenaje

Almacenar a no más de 30°C

Vida útil desde la Fabricación

36 meses

Precauciones

Mantener alejado de ojos, oídos y boca.
Evitar sobre zonas con vello. Precaución
en pacientes < 2 meses. Usar aplicador de
volumen adecuado según área a tratar

Condiciones de venta

Directa en establecimientos tipo A y B

CARACTERÍSTICAS

- 26mL de solución antiséptica gluconato de clorhexidina (CHG) 2% p/v y alcohol isopropílico (IPA) 70% v/v
- Tinturante anaranjado N°6 aprobado por la FDA para cosméticos y alimentos
- Aplicador de 26mL con pestaña frontal que resguarda, activa y distribuye la solución antiséptica
- Aplicador estéril en óxido de etileno (E.O.)
- Dosis unitaria y desechable
- Libre de látex

BENEFICIOS

- ✓ Acción rápida y persistente
- ✓ Amplio espectro de actividad
- ✓ Activo en presencia de bioproductos (sangre, lípidos, proteínas)
- ✓ Penetra efectivamente en las 5 capas de la epidermis
- ✓ Mantiene la técnica aséptica
- ✓ Protege la degradación y contaminación del compuesto activo
- ✓ De fácil uso: seguro, dosis unitaria y desechable

CERTIFICACIONES

- Registro US FDA: 020832 del 14/07/2000
- ISO 13485 emitido por British Standards Institution
- Registro ISP: F-21944/20



PRESENTACIÓN

Caja

Unidad de Venta

25 unidades

Caja x 25 unidades